

Mode d'emploi

Télécommande 2.0



Introduction de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous guide dans l'utilisation et l'entretien de votre nouvelle télécommande. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la section **Avertissements**. Il décrit comment utiliser au mieux votre télécommande.

Si vous avez des questions supplémentaires relatives à l'utilisation de votre télécommande, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

| **À propos de** | Démarrage | Manipulation | Avertissements | Plus d'informations |

Usage prévu

Usage prévu	La Télécommande 2.0 permet aux utilisateurs d'aides auditives de changer de programme et de régler le volume des aides auditives.
Instructions d'utilisation	Aucune indication d'utilisation.
Utilisateur prévu	Adultes et enfants de plus de 36 mois.
Contexte d'utilisation	Intérieur / Extérieur.
Contre-indications	Les utilisateurs d'implants actifs doivent faire part d'une prudence particulière lors de leur utilisation de l'appareil. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section Avertissements .
Avantages cliniques	Consulter les avantages cliniques de l'aide auditive.

Sommaire

À propos de

Contenu de la boîte	6
Vue d'ensemble du produit	7

Démarrage

Piles	8
Insertion des piles	9

Manipulation

Plage de fonctionnement	10
Confirmations	11
Changer le programme	12
Réglage du volume	13
Mode silencieux*	14
Accroche pour lanière	15
Entretien de la télécommande	16

Avertissements

Avertissements	17
----------------	----


Plus d'informations

Conditions d'utilisation	20
Informations techniques	22


Contenu de la boîte

La boîte d'emballage contient les accessoires suivants :

Télécommande 2.0

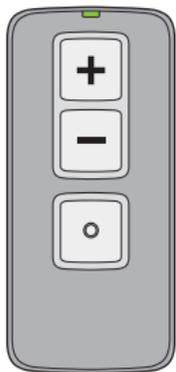

Piles

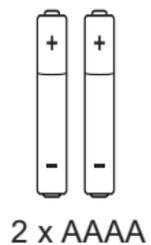


2 x AAAA

Ce mode d'emploi



Vue d'ensemble du produit

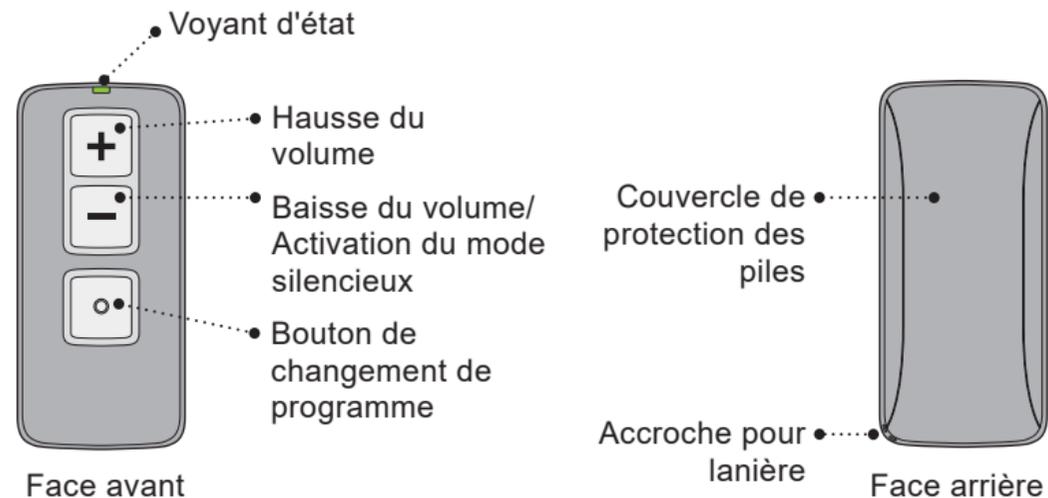

Piles


Pour activer la télécommande, vous devez insérer deux piles AAAA dans le compartiment des piles.

La durée de vie des piles varie selon les conditions d'utilisation. Une utilisation standard nécessite le remplacement des piles environ une fois par an.

Le couvercle de protection des piles ne doit jamais être forcé. S'il est nécessaire de recourir à la force pour mettre en place le couvercle de protection des piles, vérifiez l'alignement et repositionnez-le de façon à ce qu'il se mette facilement en place.

Insertion des piles


1 Retirer

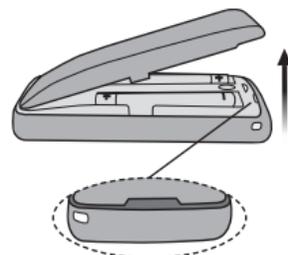

Enlevez délicatement le couvercle de protection des piles.

Retirez les piles usagées.


2 Insérer

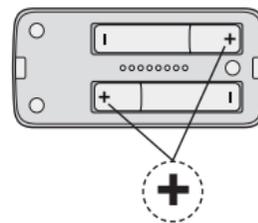

Placez les piles neuves dans le compartiment des piles.

Veillez à ce que le signe « + » de la pile corresponde au signe « + » du compartiment des piles.

3 Fermer

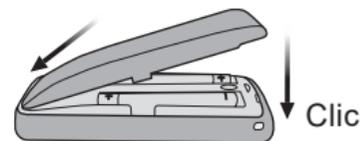

Insérez, par le haut, le couvercle de protection des piles.

Appuyez ensuite délicatement sur le couvercle de protection des piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Plage de fonctionnement

Grâce à la télécommande, vous pouvez faire fonctionner vos aides auditives jusqu'à 1 mètre de distance.

Il n'est pas nécessaire de disposer d'une ligne de mire directe entre la télécommande et vos aides auditives.

Si vous portez des aides auditives sur les deux oreilles, la télécommande les ajustera en même temps.




Confirmations

Indications visibles

Le voyant d'état indique le fonctionnement de la Télécommande 2.0. Il clignote chaque fois que l'on appuie sur un bouton.


Batterie faible

Le voyant d'état clignote lentement (une fois toutes les 2 secondes) lorsque les piles doivent être remplacées. La télécommande ne fonctionnera pas tant que les piles ne seront pas remplacées. Dans ce cas, remplacez les piles dès que possible.

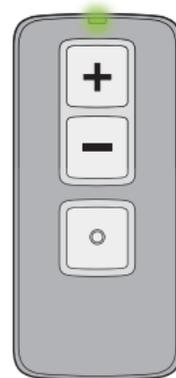

Changer le programme


Vous pouvez utiliser la télécommande pour changer le programme si votre aide auditive a plus d'un programme. Appuyez brièvement sur le bouton « • » de la télécommande pour consulter les programmes des aides auditives. Chaque pression sur ce bouton conduira au programme suivant dans le cycle.

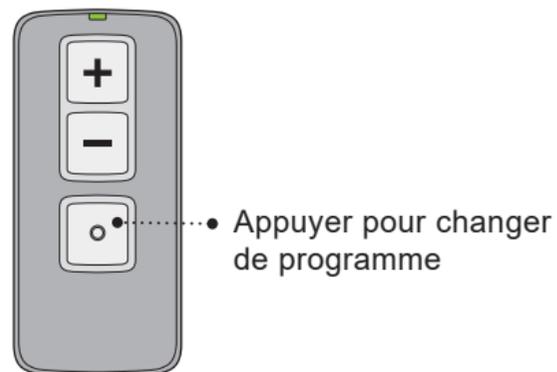

Pour revenir au programme 1 et aux réglages de volume d'origine, appuyez sur le bouton « • » pendant 3-4 secondes.

Réglage du volume

Avec la télécommande, vous pouvez ajuster le volume de vos aides auditives à l'aide des boutons de commande du volume.

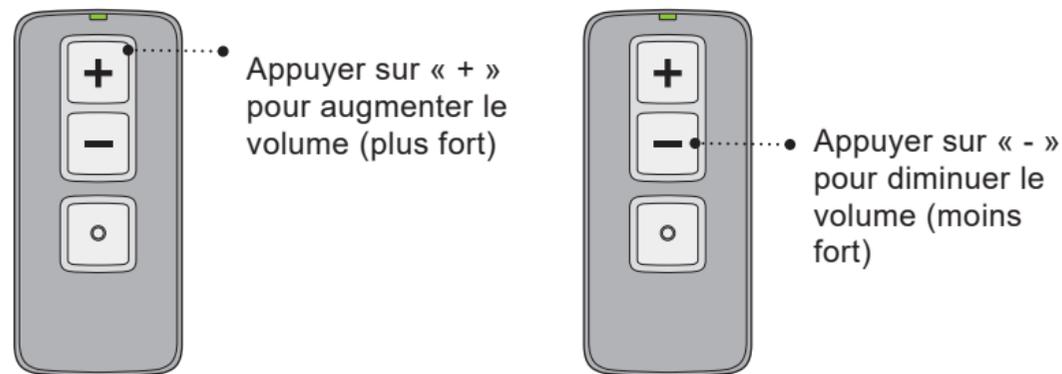


REMARQUE IMPORTANTE

Nous vous invitons à vous reporter au mode d'emploi de vos aides auditives pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre aide auditive spécifique.

Mode silencieux*

Utilisez la fonction mode silencieux si vous avez besoin de rendre muettes vos aides auditives pendant que vous les portez.

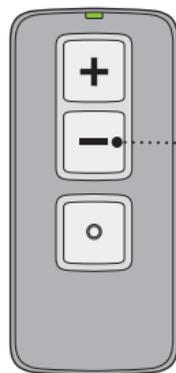

- Appuyez sur le bouton de baisse du volume pendant 3-4 secondes.


Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour désactiver le mode silencieux des aides auditives.

* La fonction mode silencieux est uniquement disponible en association avec certains types d'aides auditives sans fil. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre audioprothésiste.
Remarque : la fonction mode silencieux de l'aide auditive ne l'éteint pas. Ouvrez le logement de pile de l'aide auditive pour l'éteindre.

Accroche pour lanière

La télécommande est munie d'une accroche pour lanière dans le coin inférieur droit.

N'importe quelle dragonne adaptée peut être utilisée.

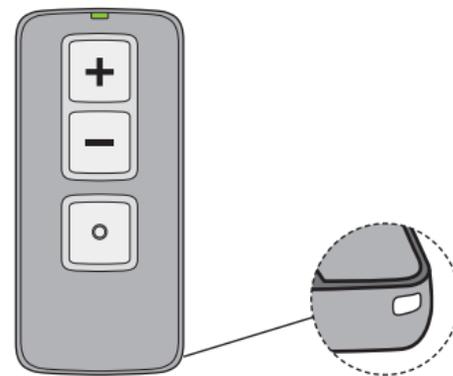

Entretien de la télécommande

Lors d'un changement de pile ou du nettoyage de la télécommande, tenez-la au-dessus d'une surface douce afin d'éviter tout dommage en cas de chute accidentelle.

REMARQUE IMPORTANTE

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la télécommande. Elle ne doit jamais être lavée ni immergée dans l'eau ni aucun autre liquide.

Avertissements

Pour votre sécurité personnelle et pour garantir une utilisation correcte de votre télécommande, vous devez bien vous familiariser avec les avertissements d'ordre général suivants avant de l'utiliser.

Consultez votre audioprothésiste si vous rencontrez des opérations inattendues ou des incidents sérieux avec votre télécommande au cours de son utilisation ou à cause de son utilisation. Votre audioprothésiste vous aidera à résoudre les problèmes liés à la manipulation et, le cas échéant, à effectuer un signalement auprès du fabricant et/ou des autorités nationales.

Utilisation des piles

Utilisez toujours les piles recommandées par votre audioprothésiste. Les piles de mauvaise qualité peuvent fuir et être à l'origine de blessures.

Ne jamais tenter de recharger vos piles et ne jamais tenter de les brûler. Un risque d'explosion ne doit pas être exclu.

Utilisation des dragonnes

Si une dragonne est utilisée, veillez à ce qu'elle soit adaptée à cette utilisation. Ne jamais utiliser un cordon pour le cou en raison du risque de strangulation.

Risques d'étouffement et risque d'ingestion des piles ou d'autres petites pièces

Votre télécommande, ses composants et ses piles doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible de les avaler ou de se blesser à leur contact.

Si une personne avale accidentellement une pile, une aide auditive ou de petites pièces, il faut appeler le SAMU ou un médecin.

Avertissements

Contrôle croisé

La télécommande doit être maintenue hors de portée des enfants ou de toute personne susceptible de prendre le contrôle de sa fonctionnalité, afin de garantir votre sécurité personnelle et d'éviter toute utilisation incorrecte.

Effets secondaires possibles

Bien que les matières utilisées pour fabriquer la télécommande soient hypoallergéniques, dans des cas très rares, elles peuvent provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets secondaires.

Dans ce dernier cas, merci de consulter un spécialiste.

Implants actifs

La télécommande a été minutieusement testée et caractérisée pour la santé humaine conformément aux normes internationales en matière d'exposition humaine (rapport d'absorption spécifique

- SAR), de puissance électromagnétique induite et de tensions dans le corps humain. Les valeurs d'exposition sont bien en dessous des limites de sécurité acceptées internationalement pour le SAR, l'alimentation électromagnétique induite et les tensions dans le corps humain définies dans les normes pour la santé humaine et la coexistence avec des implants médicaux actifs, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques.

Radiographie/tomodensitométrie/IRM/ PET-scan, électrothérapie et intervention chirurgicale

Retirez votre télécommande avant les séances de radiographie, tomodensitométrie, IRM, PET-scan et électrothérapie ainsi que pour les interventions chirurgicales pour éviter les dommages causés à votre télécommande par des champs électromagnétiques importants.

Utilisation lors de la conduite

L'utilisation de la télécommande peut vous distraire. Soyez attentif à votre environnement lorsque vous utilisez la télécommande. Veuillez vous référer au code de la route national concernant l'utilisation des appareils de communication en conduisant.

Chaleur et produits chimiques

Votre télécommande ne doit jamais être exposée à une température extrême, par exemple en le laissant dans une voiture garée en plein soleil.

La télécommande ne doit pas être séchée dans un four à micro-ondes ou dans d'autres types de fours.

Les produits chimiques contenus dans les produits de beauté, les laques, les parfums, les après-rasages, les crèmes solaires ou les produits insecticides peuvent abîmer

la télécommande. Enlevez toujours votre télécommande avant d'utiliser ce genre de produits et attendez que ce produit sèche avant utilisation.

Interférences

La télécommande a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses.

Cependant, des interférences entre la télécommande et d'autres appareils (par ex. certains téléphones portables, appareils à bande publique, systèmes d'alarme de magasins et autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre la télécommande et l'appareil concerné.

Conditions d'utilisation

Conditions de fonctionnement	Température : +10 °C à +45°C Humidité : < 85 % d'humidité relative, sans condensation Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa
Transport et conditions de stockage	La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites ci-dessous pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage : Température : -20°C à +70°C Humidité : < 85 % d'humidité relative, sans condensation Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Garantie internationale

Votre appareil bénéficie d'une garantie limitée internationale, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'appareil à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que les piles, câbles, alimentations électriques, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e)/incorrect(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non autorisé, une exposition à des conditions corrosives, des dommages dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. Selon les termes de cette garantie, le fabricant choisira, à sa seule discrétion, de réparer l'appareil ou de le remplacer par un modèle

équivalent. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

Si vous avez besoin de services d'entretien

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre appareil tout au long de sa durée de vie. Votre audioprothésiste peut vous aider à bénéficier d'un service sous garantie auprès du fabricant. Votre audioprothésiste peut exiger des frais de service.

Informations techniques

Nom du modèle	RC-2A
---------------	-------

La télécommande contient un émetteur-récepteur radio qui utilise une technologie de transmission à induction magnétique à courte distance qui fonctionne à 3,84 Mhz. La force du champ magnétique de l'émetteur est très faible et toujours inférieure à 15 nW (généralement inférieure à -15 dBµA/m à une distance de 10 mètres).

La télécommande est conforme aux normes internationales concernant les émetteurs radio, la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine.

En raison de l'espace disponible limité sur la télécommande, tous les marquages de certification sont présents dans ce mode d'emploi.

Le fonctionnement de cet appareil, lorsqu'il est porté sur le corps, répond aux limites d'exposition de la FCC et d'IC RF et a été testé en contact avec le corps humain. L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou utilisé conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique.

États-Unis et Canada

Cet appareil est certifié selon les normes suivantes :

FCC ID : 2ACAHREMCTR01

IC : 11936A-REMCTR01

Remarque

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement FCC et aux RSS exempts de licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes

1. Cet appareil ne risque pas de causer d'interférences dommageables.
2. Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Le fabricant certifie que cette Télécommande 2.0 (RC-2A) est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

Cet appareil médical est conforme au Règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745.

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.



Les déchets électroniques doivent être traités selon la législation locale.

La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.sbohearing.com



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Description des symboles utilisés dans ce mode d'emploi



Avertissements

Les textes marqués d'un symbole d'avertissement doivent être lus avant d'utiliser l'appareil.



Fabricant

L'appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans les règlements de l'UE 2017/745 et 2017/746.



Marquage CE

L'appareil est conforme à tous les règlements et directives de l'UE.



Déchets électroniques (DEEE)

Recyclez les aides auditives, les accessoires ou les piles conformément aux réglementations locales.

Les utilisateurs d'aides auditives peuvent également renvoyer les déchets électroniques à leur audioprothésiste. Équipements électroniques couverts par la directive 2012/19/UE relative aux déchets et au matériel électrique (DEEE).



Marque de conformité réglementaire (RCM)

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique applicables aux appareils fournis au marché australien ou néo-zélandais.



Logo IMDA de Singapour

Indique que l'appareil répond aux normes et spécifications publiées par Info-Communications Media Development Authority (IMDA) et est compatible avec les réseaux publics de télécommunication à Singapour et ne cause pas d'interférence des fréquences radio avec les autres réseaux de communication radio autorisés.

Description des symboles supplémentaires utilisés sur les étiquettes

	Garder au sec Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité.
	Symbole de prudence Consultez le mode d'emploi pour les avertissements et les précautions.
	Numéro de référence Indique le numéro de référence du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.
	Numéro de série Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.
	Dispositif médical Cet appareil est un dispositif médical.
	Batterie Indique le type et le moyen d'insertion de la pile.
	Label ANATEL du Brésil Indique que l'appareil est certifié et homologué au Brésil.

224419FR / 2020.08.04 / V1

224419FR / 2020.08.04 / V1



0000224419000001