

GUIDE D'UTILISATION

Fr



1

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com



Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc PhotoDECT295. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs. Il est utilisé comme combiné additionnel pour AMPLIDECT295 ou AMPLIDECT COMBI 295.



Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.


Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

  Informations sur l'adaptateur secteur: Unité principale et Médaille: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)


  Batterie rechargeable: Modèle: NI-MH AAA500x2. 2.4V, 500mAh. Corun.

Combiné

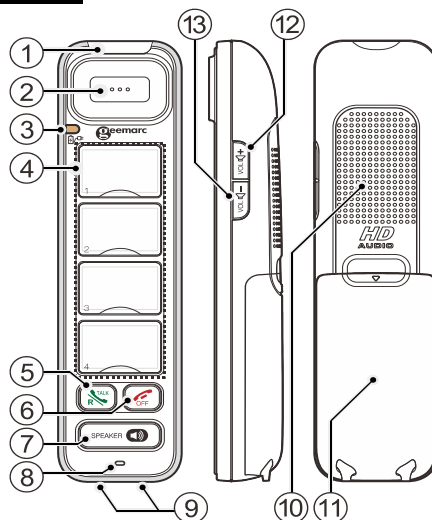


2

Insérer des photos pour les touches à composition rapide

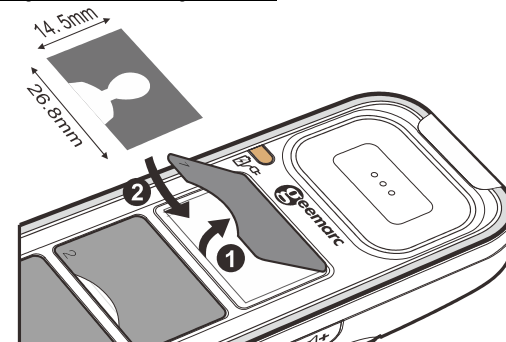

Connexion de la cosse

Chargement de la batterie ou Enregistrement du combiné

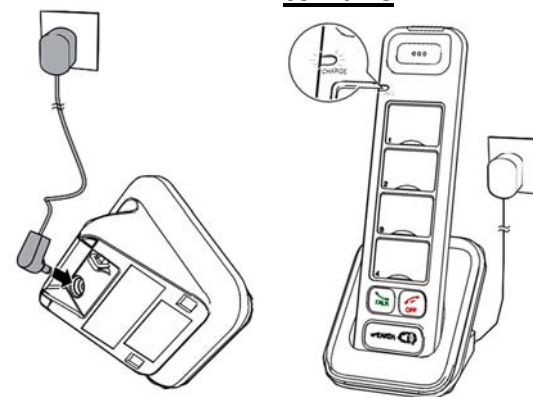

CONTENU DU COLIS

1 combiné sans fil, 1 adaptateur de courant, 1 chargeur, 1 pack de batterie NiMH, 1 guide d'utilisation.

INSTALLATION

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans le chargeur, puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone!



Branchement de la batterie

Branchez le connecteur de batterie de manière sécurisée dans la prise située à l'intérieur du compartiment de batterie du combiné.

Insérez la batterie fournie, comme indiqué. Alignez le couvercle à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au retentissement d'un clic.

3

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Remarque: N'OUBLIEZ PAS D'ENREGISTRER VOTRE COMBINÉ AUPRÈS DE LA DECT BASE (AMPLIDECT COMBI 295 ou AMPLIDECT295).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Voyant lumineux lors d'un appel entrant

Clignote lentement à réception d'un appel entrant.

2. Ecouteur

3. Voyant de charge ()

- Rouge fixe lorsque la batterie du combiné est en cours de chargement
- Long clignotements rouges lorsque le niveau de batterie du combiné est bas.
- Clignotements rouges rapides lorsque l'enregistrement du combiné est en cours.
- Clignotements rouges lents lorsque le combiné n'a pas été enregistré ou n'est pas en cours de chargement.
- Bleu fixe lorsque la fonction d'amplification est activée.

4. Touches de composition rapide avec photos

Votre combiné dispose de quatre touches de composition rapide avec photo. Il récupère le même ensemble de photos ou d'entrées en composition rapide de la mémoire directe stockées dans les modèles AMPLIDECT295 ou AMPLIDECT COMBI295.

Appuyez sur la touche pour composer un numéro prédéfini.



- Appeler ou répondre à un appel.
- Vert clair lorsque le combiné se trouve en mode écouteur.
- Au cours d'un appel, appuyez sur la touche pour accéder à la fonction de rappel (R).



- Raccrocher un appel.
- Désactiver temporairement la sonnerie lorsque le téléphone sonne.
- Désactiver la tonalité de pagination.

7. SPEAKER ()

- Appeler ou répondre à un appel en utilisant le haut-parleur.
- Commuter entre le haut-parleur et l'écouteur.
- Orange clair lorsque l'appareil est en mode haut-parleur.

8. Micro

9. Borne de chargement

10. Haut-parleur

11. Couvercle du compartiment de batterie

12. VOL+ ()

- Permet d'augmenter le volume jusqu'à 30 dB, (ou le volume de la sonnerie si l'appareil est en mode veille)
- Permet d'activer/désactiver la fonction d'amplification (DEL bleu).

13. VOL- ()

Permet de diminuer le volume d'écoute. (ou le volume de la sonnerie si l'appareil est en mode veille (jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête)).

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Unité de base : mettez tout d'abord l'unité de base AMPLIDECT295 ou AMPLIDECT COMBI 295 en mode d'enregistrement.

Combiné: Remettez le combiné à charger sur son socle, la DEL rouge clignote rapidement pour indiquer le lancement du processus d'enregistrement.

Une tonalité de confirmation sera émise dès que le processus d'enregistrement sera terminé. L'opération d'enregistrement peut prendre plus de 60 secondes.

Remarque : si problème appuyez rapidement sur [VOL+] [SPK] [VOL-] [SPK] [VOL+] [VOL-] [SPK] en mode veille, le combiné émettra alors un son « Bipbip ».

MODE D'AMPLIFICATION

Au cours d'un appel, si l'appareil est en mode d'amplification, vous pouvez augmenter le volume d'écoute jusqu'à 30dB.

- Maintenez la touche **VOL+** enfoncée (pendant 2 secondes) pour activer le mode d'amplification (la LED bleue restera allumée).
- Ré appuyez sur la touche **VOL+** et maintenez-la enfoncée pour annuler le mode d'amplification (la LED s'éteint).

GARANTIE

Votre PhotoDECT295 Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.


IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce PhotoDECT295 est conforme aux exigences essentielles

ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE concernant les équipements hertziens
La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

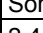Paramètre RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Puissance de la fréquence radio	< 250mW
Alimentation électrique	
Chargeur	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie DC6V  0.45A, 2.7W adaptateur
Combiné	2,4 V; Batterie rechargeable NiMh 500mAH

Branchement électrique : l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral Marche / Arrêt. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

DIRECTIVE DE RECYCLAGE:

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
 - Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.
- Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits :

www.geemarc.com

Email: sav@geemarc.fr

Téléphone: **03 28 58 75 99**

2 rue Gallée, Parc de l'étoile, 59760 Grande-Synthe, France.

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A.

