
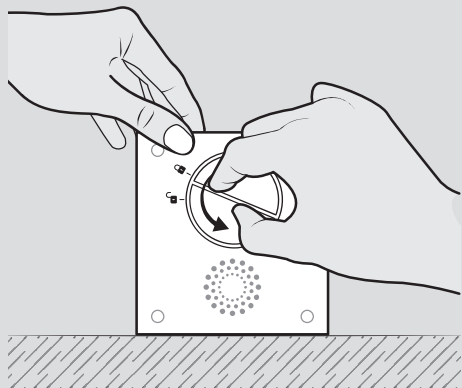


Nettoyage du filtre - A faire avant chaque utilisation d'une nouvelle recharge.

1

Retirer le bouchon-filtre

Important : posez la PerfectClean sur la face avant, face avec le bouton de démarrage (mode sécurisé pour éviter tout écoulement de liquide). Retirer le bouchon filtre en le faisant pivoter vers la gauche jusqu'à la position .





2

Nettoyer le bouchon-filtre

Option A


Pour filtre peu sale : nettoyez avec de l'eau chaude.

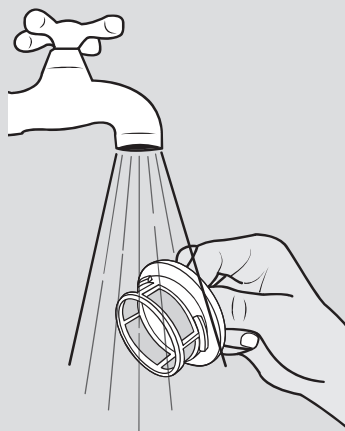

Après le nettoyage remettre le bouchon-filtre en position  et le tourner vers la droite jusqu'à la position .

Option B

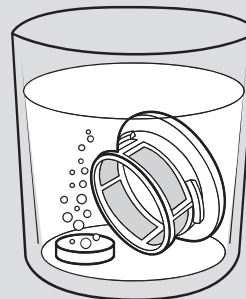


Pour filtre très sale ou encrassé : nettoyez avec un comprimé de nettoyage (20 minutes), puis rincez à l'eau chaude.



Précautions d'emploi particulières

Utiliser la recharge uniquement lorsque la PerfectClean le signale. Vider complètement la recharge à chaque remplissage.


Vidange (en vue d'un voyage ou transport)

1. Poser la PerfectClean sur la face avant (face avec le bouton de démarrage).
2. Retirer le bouchon filtre en le faisant pivoter vers la gauche jusqu'à la position .
3. Remettre la PerfectClean à plat, au-dessus d'un évier, afin d'évacuer le liquide restant.
4. Remettre le bouchon en position  et le tourner vers la droite jusqu'à la position .

Conseils d'entretien

Il est fortement recommandé de nettoyer les aides auditives quotidiennement. Une recharge permet de réaliser entre 40 et 50 cycles*, de 20 à 25 cycles* lorsque le réservoir est vide (première utilisation ou après vidange pour transport)

*Quantités données à titre indicatif. Ces données peuvent varier selon les appareils auditifs.

 **Une fois le cycle terminé, essayez les aides auditives avec un tissu propre et absorbant.**

Règlement applicable aux dispositifs Médicaux

Ce produit répond aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Consignes de sécurité

- Ne jamais utiliser de produit ou liquide de substitution à celui présent dans la recharge nettoyante.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.
- Le non-respect de ces consignes annule la garantie.
- Tenir hors de portée des enfants.



Pour l'entretien des aides auditives. En cas de problème, rapprochez vous d'un audioprothésiste. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisation et / ou le patient est établi.

30 ml



Mode d'emploi

PerfectClean Recharge de solution de nettoyage pour aides auditives

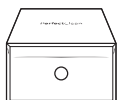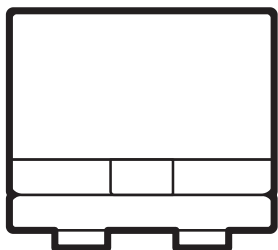


Bien entendre tous les jours
PerfectClean

Mise en marche - Charger la PerfectClean avec la solution de nettoyage (dès que le voyant vous l'indique).


1

Retirez totalement la languette de la recharge.

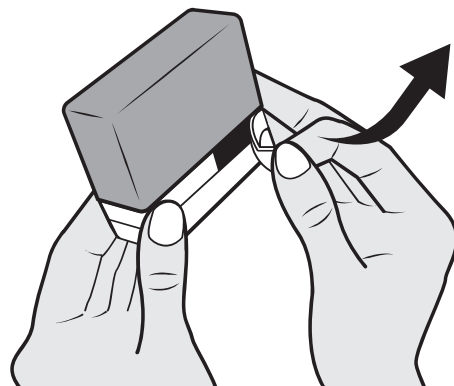

2

Positionnez la recharge tête en bas, à l'emplacement prévu dans la PerfectClean.

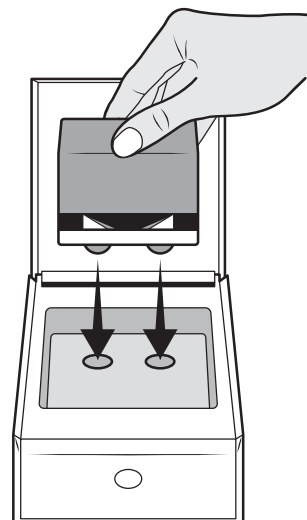

3

Appuyez progressivement et horizontalement sur la recharge jusqu'à la butée afin de percer les opercules. Attendez que la totalité du liquide se soit écoulée.

